

Köszönjük, hogy a BETÉT-TOP KFT-t választotta. Hogy a lábbeli viselésében öröme legyen, kérjük, hogy tájékoztatónkat figyelmesen olvassa végig. A lábbeli használhatósága, rendeltetése: Az Ön által megrendelt termék, gyógyászati segédeszköz.

Megfelelősségi Nyilatkozat

A BETÉT-TOP Kft. által gyártott, rendelésre készült orvostechnikai eszköz(ök)

m e g f e l l (e k)

az MDR I. mellékletben található biztonságosságra és a teljesítőképességre vonatkozó követelményeknek. Az MDR XIII. melléklet 2. pontja szerint rendelkezem olyan dokumentációval, amely tartalmazza az eszköz tervezésének, gyártásának, teljesítőképességi jellemzőinek, elvárható teljesítőképességi jellemzőinek megértéséhez szükséges adatokat.

FELHASZNÁLÁS KÖRÜLMÉNYEI:

Utcai használatú lábbeli, természetes körülmények közötti használatra.

Természetes körülmények tekinthető:

- levegő hőmérséklete -10 +30°C közötti tartomány
- normál légnyomás és relatív légnedvesség
- utcai útviszonyok (aszfaltút, földút száraz, nem mély sáros)
- 2 óránál nem több esőben tartózkodás
- lakáson belüli használat (nem helyettesíti a szobacipőt)

NEM HASZNÁLHATÓ:

- Minden olyan munkahelyen, mesterségesen létrehozott hőmérsékleten, légnyomáson, légnedvességen amely a fentiektől eltér
- Biológiai, vegyszerrel szennyezett környezetben
- A talpszél magasságát meghaladó vízmélységben
- Sáros földúton

A LÁBBELI ANYAG ÖSSZETÉTELE

Felsőrész anyaga:	természetes bőr
Bélés anyaga:	természetes bőr vagy textil
Talp anyaga:	természetes bőr vagy műanyag

ÁPOLÁSI TANÁCSOK

A lábbeli formáját és anyagainak jó állapotát csak gondos ápolással lehet fenntartani. Ezért célszerű a következő ápolási javaslatokat betartani: A teljes barkás felületű bőr felsőrészt viselés után tisztítsuk meg a szennyeződésektől. A felsőbőrrel félkemény sörtéjű kefével, majd tiszta vízzel nedvesített törölkendővel történő mosással távolítsuk el a szennyeződéseket. A talp szélét és a talpfelületet durva sörtéjű kefével és vizes lemosással tisztítsuk. Száradás után a felsőrészre vékonyan kenjük cipőkrémet. A krém beszívódása után puha kendővel töröljük át a felsőbőrt a kívánt fény eléréséig.

Csiszolt felsőbőrök (pl. nubuk, velúr) a szennyeződéseket keményszűrő kefével távolítsuk el és az anyag színével megegyező színű spray-vel vékonyan fújjuk le. Szappanosodás esetén a bőr felületét legalább 120-as finomságú csiszolóvászonnal enyhén dörzsöljük, kefével simítsuk, majd spray-vel fújjuk át. Ápolás után ellenőrizzük a cipő belsejét, majd natúr fa sámfával, vagy nedvszívó papír kitömővel célszerű a cipőt kitömni. A cipőt hőforrástól távol, szellős helyen tároljuk.

A TERMÉK FELHASZNÁLHATÓSÁGI IDEJE, REKLAMÁCIÓ, SÚLYOS VÁRATLAN ESEMÉNY

A társadalombiztosítási rendelet előírása szerint a lábbeli egy éves kihordási időre készült. A felírástól számítva egy év a termék felhasználhatóságának ideje, amíg megőrzi a biztonságosságát és teljesítőképességét. Ez betartható rendeltetésszerű használat mellett és ha a meghibásodások javítását időben elvégeztetjük. Rendeltetés szerinti használat mellett a cipő rejtett hibáit javítjuk. Ezt követően a javítás a lakossági cipőjavítási díjakkal rendelhető meg.

Amennyiben az eszköz használata közben, azzal kapcsolatban az MDR 87. cikk szerinti súlyos váratlan esemény előfordul (mely az egészségi állapot súlyos romlását, halált okozott vagy okozhatta volna), szükséges jelezni a gyártó felé, továbbá az illetékes hatóságnak: Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet-Orvostechnikai Főosztály e-mail: amd.vig@ogyei.gov., 1051 Budapest, Zrínyi u. 3.)

A LÁBBELI JAVÍTÁSA

Az esetleges javítások telephelyeinken történnek. Kérjük, ezt a tanúsítványt hozza magával. A sarok foltra jótállási kötelezettséget nem vállalunk.

